

胸骨・恥骨・背部の三点固定で脊椎前方への負荷を軽減します。



高さ調整範囲

サイズ

L 36cm ~ 41cm

M 33.5cm ~ 38cm

S 31cm ~ 36cm

胴囲

58cm ~ 101cm




締め込みバックル採用



ストップ機能で常に一定の締め付けが可能です。



角度調整機能装備

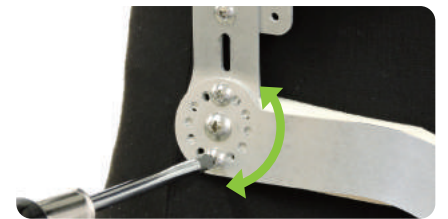

角度アジャスターで屈曲・伸展角度の調整をします。**1穴6度で15ミリの高さ調整が可能です。**

装着方法(立位・座位)



1 恥骨パッドが恥骨に当たるように上下の位置を合わせます。



2 締め込みバックルを最後まで差し込みセットします。



3 脊椎パッドの中心を脊椎に合わせて、ベルトをカンに通し、患者様の体形に合わせて引き締めます。
 ※ベルトが長い場合はカットしてください。



4 胸骨・恥骨・背部パッド以外、過度の圧迫感、及び痛みの無いことを確認してください。

使用上の注意

- 使用に関しては、必ず医師及び義肢装具士の指導に基づき正しく装着してください。
- 装着前に、ベルト・支柱・ネジや接着部等に異常が無い点検してください。
- 直接肌への装着は、摩擦や被れの恐れがございますので、肌着等を装着してお使いください。
- 使用中に痛みや被れが生じた場合は、直ちに医師または義肢装具士へご相談ください。
- 装具の修理・加工・改造をしないでください。
- その他、ご不明な点、不都合なこと等がありましたら、当社までご連絡ください。