

装着方法

! 必ず背もたれのあるイスに腰掛けた状態で装着してください。
 脊椎パッドは調整済みですのでマジックテープを剥がさないでください。



1 締め込みバックルを写真の位置にできるように装着し、ベルトをバックルに差し込みます。



2 差し込みバックルのグレーのレバーを数回カチカチッと繰り返し引き上げます。



3 製品を正面に移動させます。



4 正面に移動後、再度差し込みバックルのグレーのレバーをカチカチッと繰り返し最後まで引き上げます。



5 胸骨・恥骨・背部パッド以外、過度の圧迫感、及び痛みの無いことを確認し装着完了です。

脱着方法

! 必ず背もたれのあるイスに腰掛け、背もたれにもたれかかった状態で外してください。
 ロック解除時に急激にベルトが緩むことで、脊椎に負担がかかる場合があります。



1 脱着時も必ず背もたれのあるイスに腰掛け、背もたれにもたれかかった状態で外します。



2 赤色のレバースイッチを手前にしっかりと引き、ベルトを後ろに引きます。



3 完全にベルトを引き抜き、製品を体から外します。

使用上の注意

- 使用に関しては、必ず医師及び義肢装具士の指導に基づき正しく装着してください。
- 装着前に、ベルト・支柱・ネジや接着部等に異常が無い点検してください。
- 直接肌への装着は、摩れや被れの恐れがございますので、肌着等を装着してお使いください。
- 使用中に痛みや被れが生じた場合は、直ちに医師または義肢装具士へご相談ください。
- 装具の修理・加工・改造をしないでください。
- その他、ご不明な点、不都合なこと等がありましたら、当社までご連絡ください。